













Автоматические ланцеты для взятия капиллярной крови



PROLANCE



- Эргономичный дизайн для удобства использования;
- Механизм самоактивации исключает возможность повторного применения;
- После прокола игла убирается автоматически, исключая случайное соприкосновение пациента или врача;
- Игла гамма стерилизована и закрыта специальным колпачком;
- 6 различных размеров, обозначенных цветовой кодировкой, позволяют подобрать ланцет необходимого потока крови;
- Минимальные болевые ощущения: двойной пружинный механизм обеспечивает высокую скорость прокола и устраняет вибрацию иглы.

Название	Размер иглы	Глубина прокола	Кат. номер
 Prolance Micro Flow	28G	1,6 мм	 1B34-510200
 Prolance Low Flow	25G	1,4 мм	 1B32-510200
 Prolance Normal Flow	21G	1,8 мм	 1B31-510200
 Prolance High Flow	18G	1,8 мм	 1B33-510200
 Prolance Max Flow	лезвие ширина 1,5 мм	1,6 мм	 1B36-510200
 Prolance Pediatric	лезвие ширина 1,5 мм	1,2 мм	 1B35-510200

Инструкция по применению:

Открутите защитный колпачок на 360 градусов и извлеките его.



www.corway.ru

Плотно прижмите корпус ланцета к месту прокола примерно 2 мм от ногтя и нажмите кнопку для активации ланцета.



Производитель: HTL-STREFA S.A., Польша

ООО „Корвэй“

Санкт-Петербург: (812) 677-06-06

Москва: (495) 989-86-90