


Автоматические ланцеты Golden Lancet Standart

Инструкция по использованию


Принцип использования и предназначение:

Безопасные автоматические ланцеты предназначены для получения образцов капиллярной крови для анализа в больнице или мониторинга уровня глюкозы в крови

Инструкция:

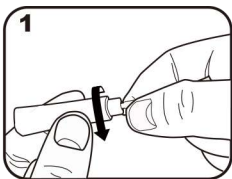

1. Открутите
колпачок

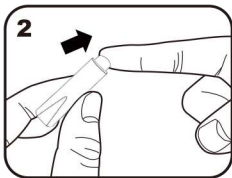

2. Прижмите защитный ланцет
к кончику пальца пациента
и осторожно надавите,
чтобы взять кровь.

Процедура:

- Протрите подушечку пальца спиртовой салфеткой и дайте коже высохнуть в течение примерно 10 секунд
- Используйте защитный ланцет сразу после вскрытия упаковки
- Следуйте приведенной выше 2-шаговой инструкции, чтобы использовать безопасный ланцет для взятия крови.
- Утилизируйте все использованные защитные ланцеты в надлежащий контейнер для отходов.
- Примечание: срок годности составляет 5 лет, и использование продукта после истечения срока годности строго запрещено